

Máscara Social Descartável



Modelo B - TNT 2
Nível 3 (População em geral)

TORVES, LDA
LARGO DO CALVÁRIO N° 10
6200-734 TORTOSENDO

Composição da máscara

Duas camadas de TNT polipropileno branco 60grs (com selo COVID-19 Aprovado 6434A/2020 CITEVE)

Cumpra os requisitos relativos à respirabilidade e capacidade de filtração de partículas para máscaras utilizadas no contexto do COVID-19, comprovado com Declaração de Conformidade através do "Relatório CITEVE nº 6434B/2020"

Uso único.

Marca Comercial ou código/Ref.ª: Modelo B - TNT 2

Nº lote / Mês / Ano de Fabrico: Ver embalagem




Instruções de utilização

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>


A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- Colocação da máscara descartável com a face interna virado para a cara, e a face externa virado para fora;
- Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;
- Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;
- A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;
- A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos adequado;
- Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

Pictograma exemplificativo de colocação de máscara

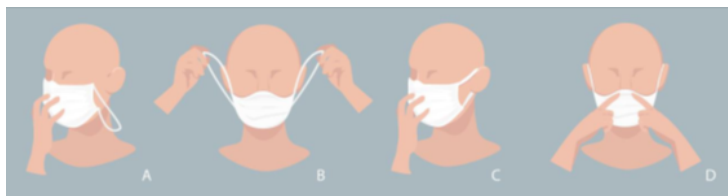


Pictograma exemplificativo da retirada de máscara

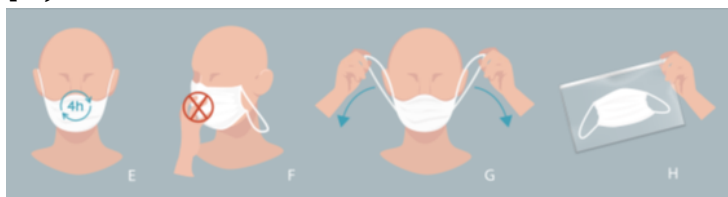

Identificação de direito e avesso

Na face interna da máscara estão aplicados os elásticos

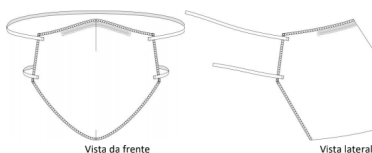

Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual (regulamento UE/2016/425); Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível.